

SPOO



الجيل الجديد من عيادات الخصوبة

WWW.SPOOHEALTH.COM


هل أنت مستعدة لبدء رحلة الخصوبة؟

لست وحدك




يؤثر العقم على حوالي 15% من الأزواج في جميع أنحاء العالم. يعني مُصطلح العقم عدم القدرة على الحمل، رغم ممارسة الجماع بشكل متكرر، ودون ارتداء واقٍ لمدة عام على الأقل بالنسبة لمعظم الأزواج. العقم عند الرجال مشكلة شائعة أكثر مما يميل البعض إلى الاعتراف. في معظم البلدان، غالباً ما تلقى اللوم على النساء بسبب العقم، لكن التقارير العلمية أظهرت أن الرجال مسؤولون عن 50% من حالات العقم.

في SPOO، نتفهم التحديات التي يواجهها الرجال مع العقم وعملنا بجد لتطوير نظام فريد من نوعه لفحص الخصوبة في المرحلة الأولى بناءً على تجربة التشخيص السريري.

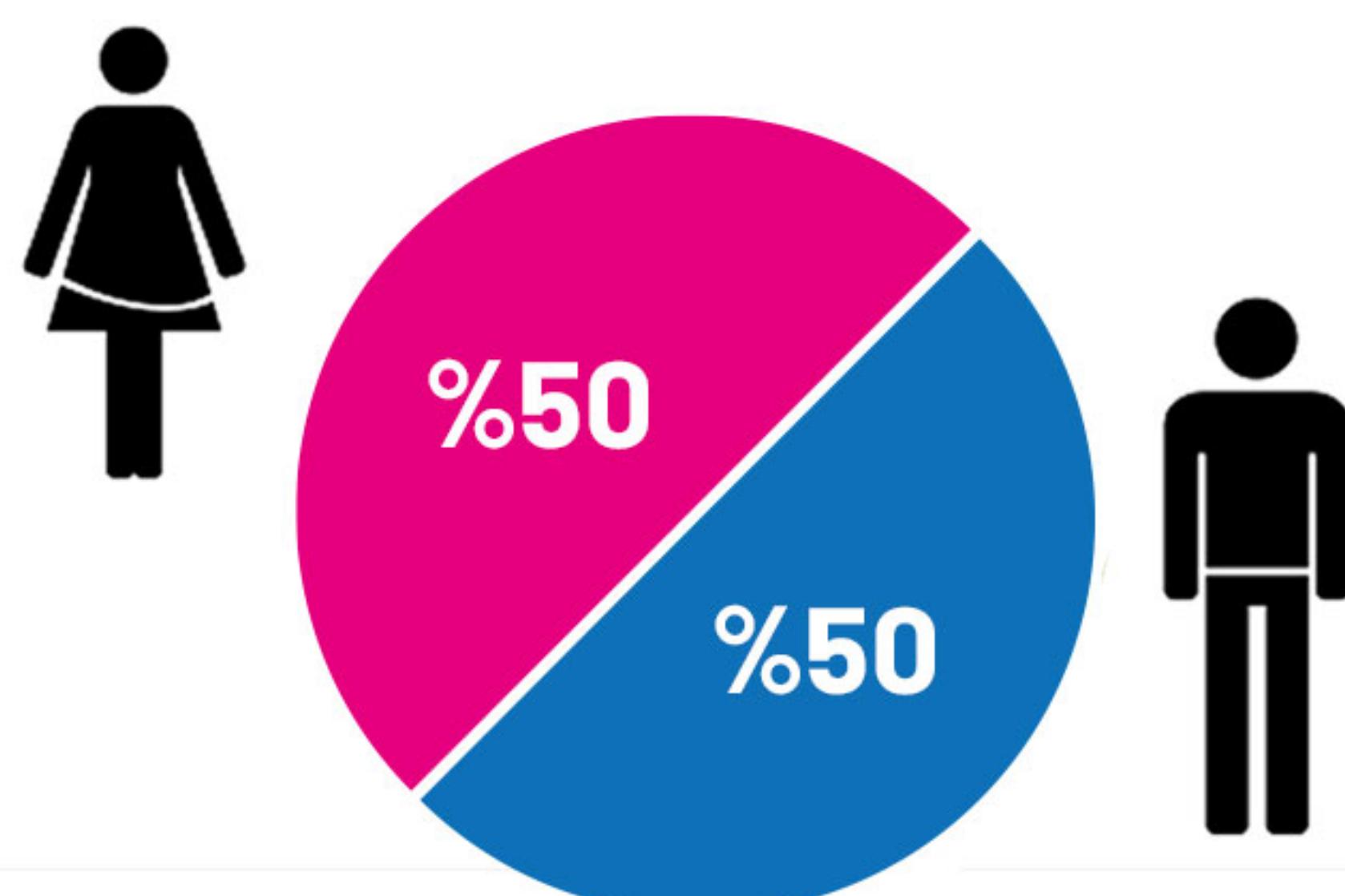

معلومات SP00

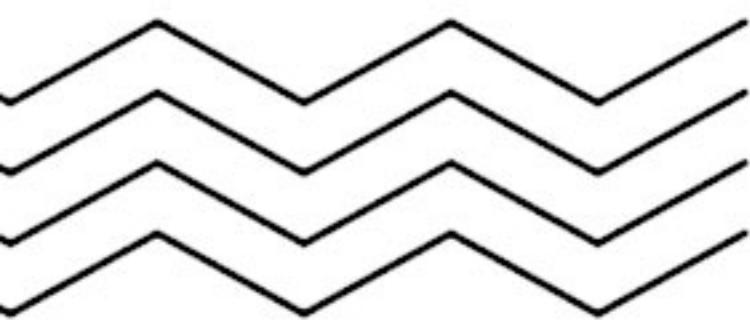

معلم منزلي صغير

يستغرق التحليل اليدوي للسائل المنوي باستخدام المجهر وقتاً طويلاً و يتطلب تدريباً مكثفاً. علاوة على ذلك، تم التشكيك في صحة تحليل السائل المنوي اليدوي بسبب قابلية التكاثر المحدودة.

نهجنا الرئيسي في SP00 هو استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بكمية الحيوانات المنوية و جودتها.

اختبار الحيوانات المنوية في المنزل


يعد اختبار الحيوانات المنوية في المنزل خياراً رائعاً للرجال الذين يرغبون في الحصول على إجابات حول خصوبتهم في أسرع وقت ممكن.

يعد اختبار الحيوانات المنوية في المنزل خياراً ميسور التكلفة و دقيقاً و مناسباً للرجال الذين يتطلعون إلى التتحقق من خصوبتهم في المنزل.

الجيل الجديد من عيادات الخصوبة القائمة على الذكاء الاصطناعي

تقوم مجموعة اختبار الحيوانات المنوية المنزلية SP00 بفحص كمية و نوعية الحيوانات المنوية. لاحاجة لزيارة مركز العقم أو المختبر. يتيح لك SP00 مراقبة و تتبع تقدم جودة الحيوانات المنوية بمرور الوقت.

يمكنك بدء التقييم الخاص بك عن طريق إدخال شريحة تحتوي على عينة من الحيوانات المنوية في الجهاز و تفعيل التطبيق.

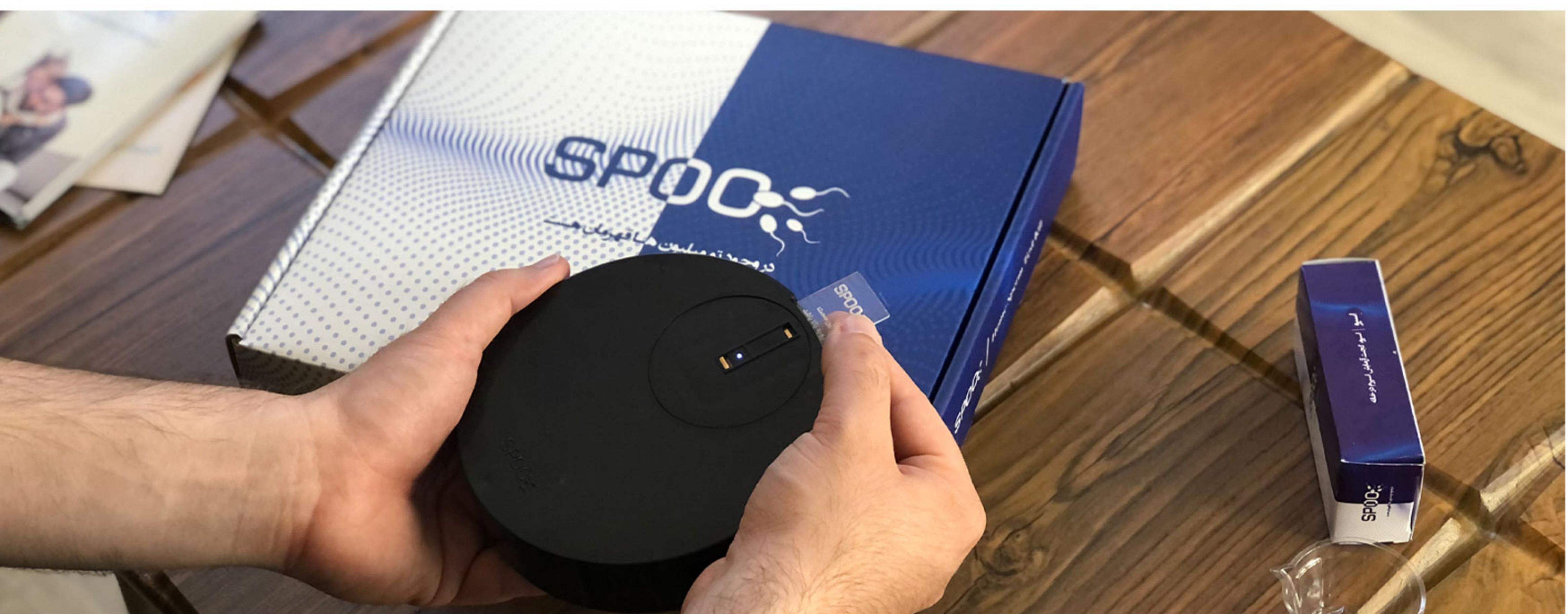

طقم SP00


لا يوجد رجل يريد الذهاب إلى المختبر لفحص السائل المنوي، و هي عملية لا يرتاح لها معظم الرجال. بدلاً من ذلك، يمكنك إجراء أول اختبار للحيوانات المنوية في المنزل.

SP00 هو جهاز يمكن الرجال من إجراء اختبار الخصوبة بشكل أكثر راحة في المنزل، و الإطلاع على تحليله و الحصول على المشورة من أفضل المتخصصين في الخصوبة لتحسين حالة الخصوبة لديهم. تتضمن كل مجموعة ثلاثة اختبارات، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين تتبع نتائجهم و تحسينها عبر جلسات اختبار متعددة.




ما هي المعايير التي يقيّمها SP00 ؟


تعترف منظمة الصحة العالمية بالهواتف الذكية كأداة ممتازة لتحليل الحيوانات المنوية لأنها مزودة بكاميرات رقمية عالية الجودة.

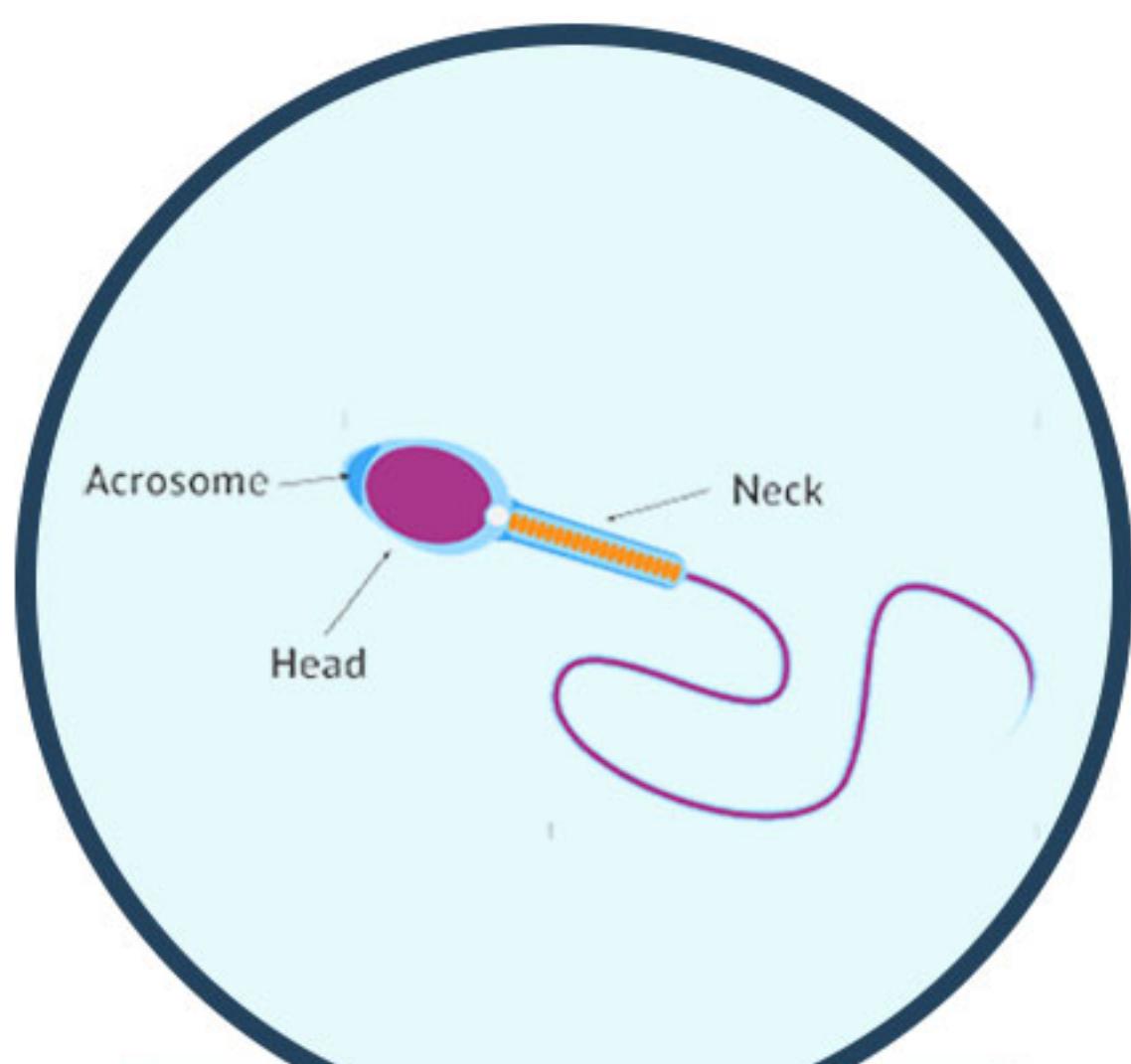

شكل الحيوانات المنوية

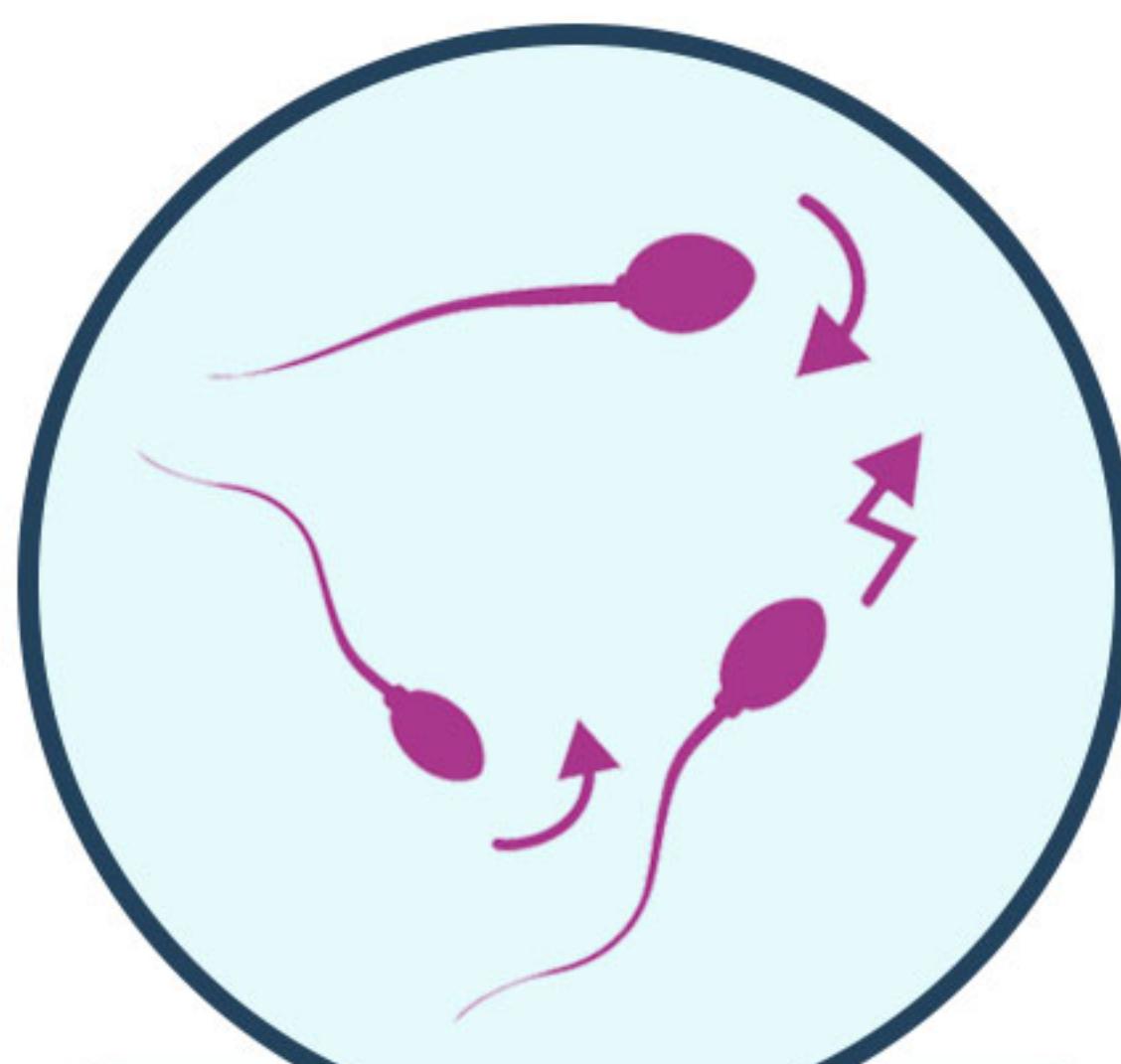

حركة الحيوانات المنوية

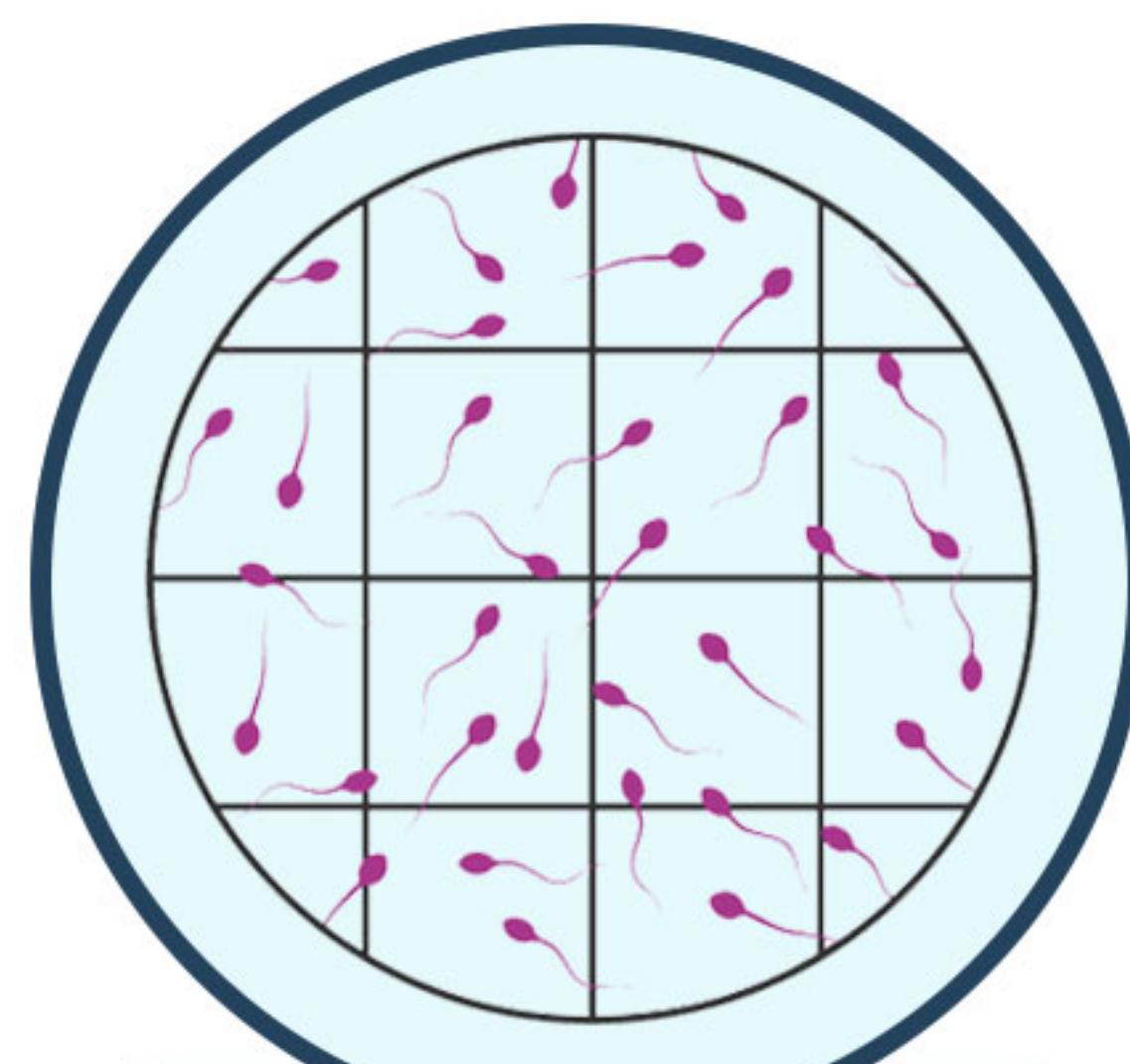

عدد الحيوانات المنوية

كيف يعمل SP00 ؟

ماذا يحدث عندما يتحوال هاتفك الذكي إلى مختبر لفحص الحيوانات المنوية؟



إذا كنت تبحث عن الطريقة الأسهل والأكثر خصوصية لاختبار الحيوانات المنوية، فقد يكون تطبيق SP00 SPERM هو إجابتكم.


SP00 هو تطبيق اختبار الحيوانات المنوية على الهاتف الذكي الذي يحل عدد الحيوانات المنوية وحركتها وشكلها. يستخدم SP00 تقنية خصوبة متقدمة لتتبع صحة الحيوانات المنوية - كل ذلك على هاتفك الذكي، وليس في المختبر. يساعدك جهاز التحليل SP00 على تحويل هاتفك الذكي إلى معمل منزلي صغير.

خدمات SP00

يوفر تطبيق SP00 فرصة للرجال لمناقشة مخاوفهم بشأن الصحة الجنسية و الخصوبة مع أطباء الخصوبة المحترفين. إذا لزم الأمر أو طلب، يقترح أيضًا أفضل عيادة محلية متاحة.



اختبار الحيوانات المنوية

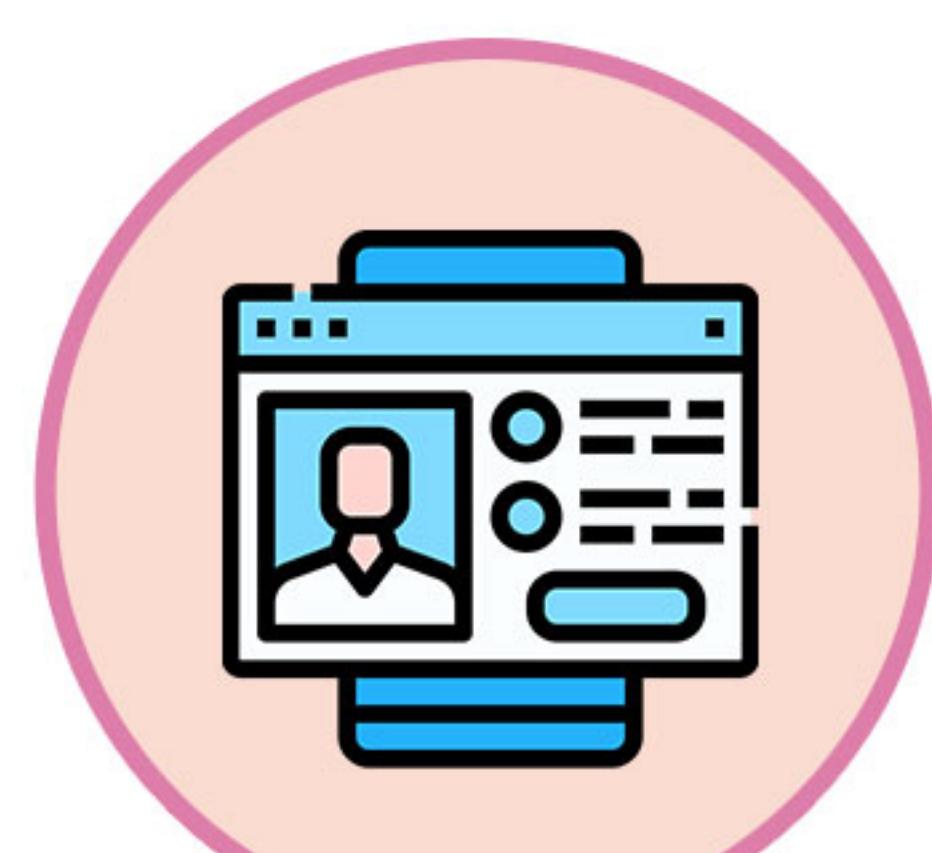

اختبار الصحة الجنسية




استشارة الخصوبه عن بعد



إخلاء المسؤولية: استشر دائمًا أخصائيًا طبيًا قبل إجراء أي تغييرات على نمط حياتك
(التمرين أو النوم أو التغذية)

تعليمات لإجراء الاختبار في المنزل (خطوة بخطوة)

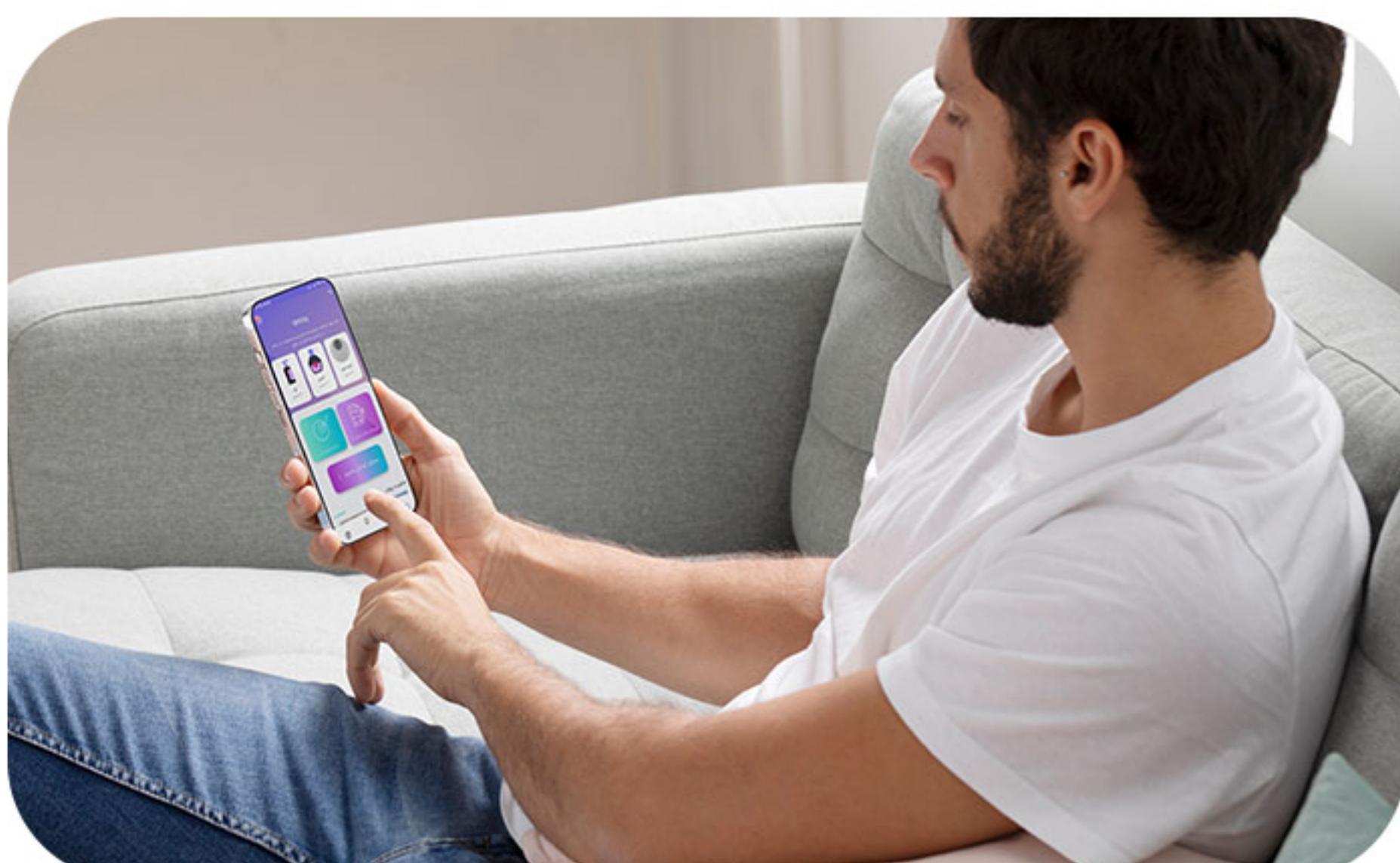


1) قم بتنزيل تطبيق SP00 من WWW.SPOOHEALTH.COM قبل إجراء اختبار تحليل الحيوانات المنوية.

- 2) تأكد من عدم تلقيك إشعارات على هاتفك الذكي أثناء التقديم.
- 3) لا تهزم الهاتف المحمول على المحلل بأي شكل من الأشكال عند تنشيط التقديم.

كيفية عمل اختبار الحيوانات المنوية



الخطوة 1 افتح الصندوق و استعد.
يتم توفير جهاز التحليل و مكونات الاختبار لك. يتم تحضير كل مجموعة لإجراء أربعة اختبارات للحيوانات المنوية.

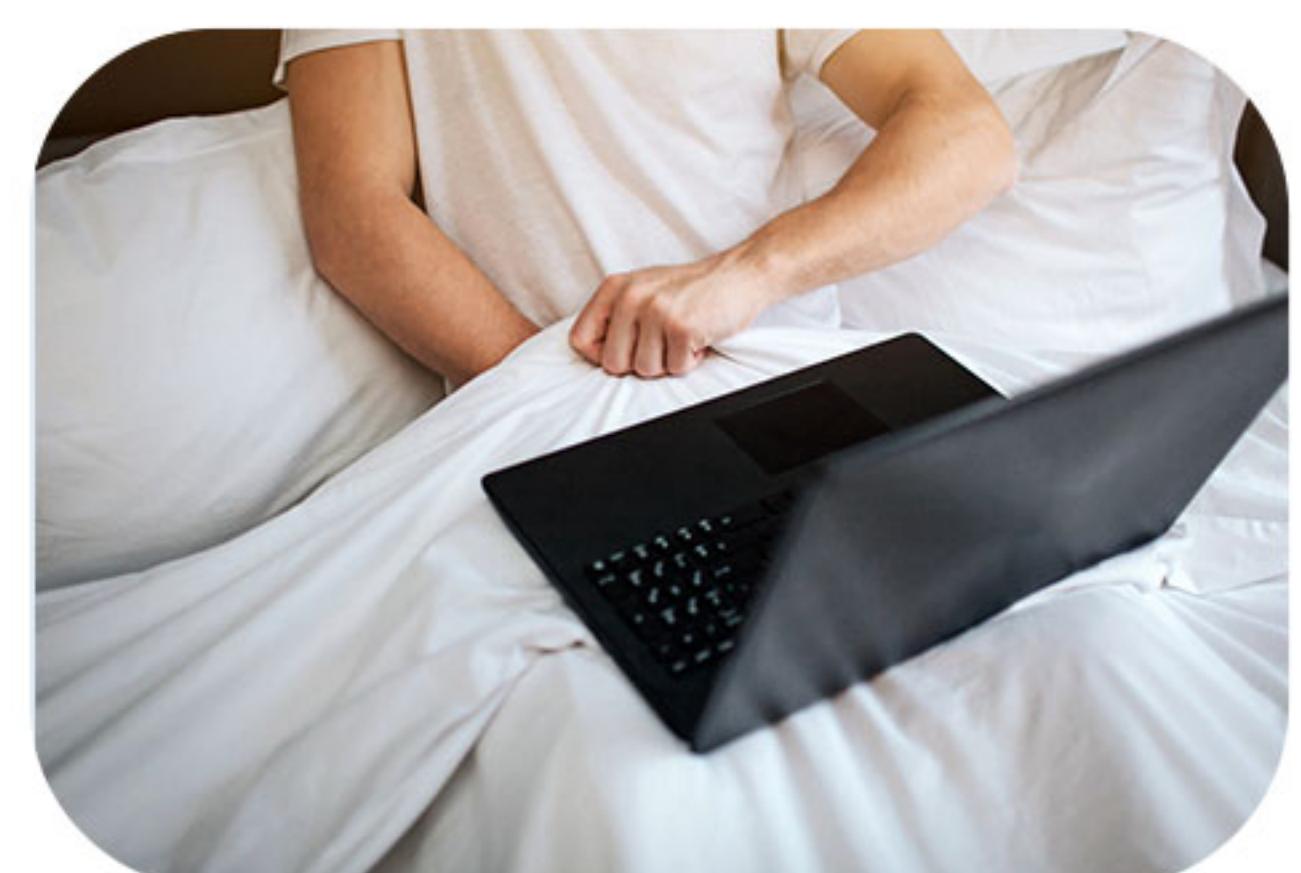


الخطوة 2 جمع السائل المنوي مباشرة في الكوب.



الخطوة 3 ضع العينة في الكوب لمدة 15 دقيقة في درجة حرارة الغرفة العادية.



الخطوة 4 ضع الجهاز على سطح مستو.

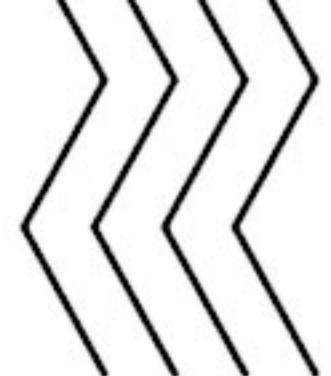

الخطوة 5) ضع الشريحة داخل الجهاز كما هو موضح في الصورة حتى يضيء ضوء الجهاز. (شعار SP00 موجود على السطح الخارجي للجهاز).




الخطوة 6) في التطبيق المثبت، انتقل إلى قسم "اختبار الحيوانات المنوية". ثم امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على البطاقة في الصندوق لتفعيل تقييم الحيوانات المنوية. يمكنك بدء التقييم من خلال تلقي الرسالة التالية "تم اكتشاف الجهاز و تسجيله برقم هاتفك المحمول".

الخطوة 7) ضع الهاتف الذكي على الجهاز.
ثم انقر فوق "ابدأ" لبدء التقييم.



الخطوة 8) يستغرق التسجيل فيديو دقيقة واحدة، ثم اعتماداً على سرعة الاتصال بالإنترنت و نوع الهاتف الذكي، يستغرق عادةً من 3-5 دقائق لإكمال التقييم و عرض النتائج على "صفحة النتائج".



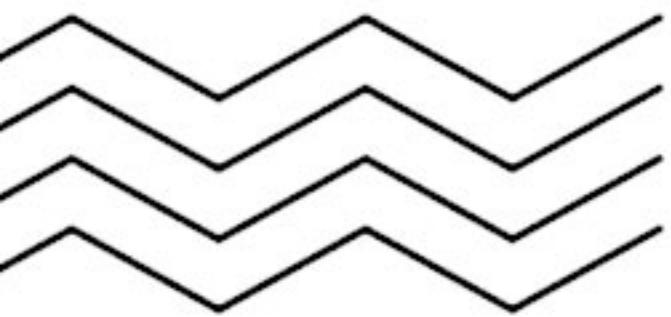

SP00 الجيل الجديد من عيادات الخصوبة

لطالما كان العقم تجربة مرهقة. في السنوات الأخيرة، ازداد مستوى العقم في العالم. تظهر الدراسات الحديثة أن عدد الحيوانات المنوية قد انخفض بأكثر من 50٪ خلال الأربعين سنة الماضية. لسوء الحظ، يعاني واحد من كل سبعة أزواج في العالم من مشاكل في الخصوبة. نعتقد أن لدينا مسؤولية لدعم مجتمع آباء المستقبل.

بغض النظر عن الوضع في الحياة أو الأهداف الشخصية، نريد أن يشعر الرجال أنهم ليسوا وحيدين في هذه الرحلة. يتم تحديد إطار عمل الشركة الذي نحن فيه على النحو التالي: احترام حساسية قضية العقم عند الرجال. عادة ما يتبعون علينا نقل الأخبار الصعبة للرجال طوال الوقت. نتعامل مع المعلومات الحساسة. نحن نساعد الرجال على أن يصبحوا آباء. نحن بحاجة إلى التحدث بطريقة تكرم هذه اللحظات - بعناية واحترام ومهنية. إذا سألت أي زوجين عانوا من العقم، فسيخبرك معظمهم أن رحلة العقم عاطفية ومرهقة، مليئة بالدموع وخيبة الأمل والتكاليف المالية الباهظة، فارتفاع تكلفة علاجات الخصوبة والعمليات الجراحية غير الناجحة المتكررة تسبب التوتر وانكسار القلب.

نحن معك خلال هذه الرحلة. تعتبر SP00، وهي شركة تقدم خدمات الخصوبة عن بعد للرجال، وشركة رائدة في هذا المجال، أن من واجبها ضمان وصول جميع الرجال إلى خدمات الخصوبة.





🌐 www.spoohhealth.com

✉️ Info@spoohhealth.ir

📞 **02171057606**

العنوان: طهران، جلال الأحمد ، جسر النصر، جامعة تربية مدرس